

# Руководство к действию



Заполните регистрационную форму (бумажный буклет) **в соответствии с указанными в ней требованиями.**



Извлеките две пробирки из коробки.

**Важно! Для анализа необходимо использовать только пробирки из комплекта. Запрещается открывать пробирку. Не снимать резиновые колпачки.**

Возьмите кровь у пациента: **заполните обе пробирки** (см. инструкцию-вкладыш в коробке).



Поместите заполненные пробирки обратно в тканевый чехол, а затем в прозрачный пакет. Оберните пакет с пробирками гелевым хладоэлементом.



Поместите пробирки вместе с хладоэлементом в фольгированный конверт, заклейте его и упакуйте обратно в картонную коробку вместе с заполненной регистрационной формой (бумажный буклет).



Свяжитесь с нашим специалистом службы логистики для отправки комплекта (картонной коробки) в лабораторию по телефону **8 800 500 92 18**. Полностью собранный комплект поместите в пакет транспортной компании.